

DayClocks

Gebruikershandleiding



DayClocks

Voorwoord

Bedankt voor de aanschaf van uw DayClock! Deze handleiding beschrijft het gebruik van:

- de DayClock met DayClock abonnement
- de DayClock zonder DayClock abonnement

Zie hoofdstuk 3 Product omschrijving voor meer informatie over het DayClock abonnement.

Deze handleiding beperkt zich tot het beschrijven van de basisfunctionaliteiten van de DayClock en hoe u activiteiten kan aanmaken. Niet alle functionaliteiten zijn in deze handleiding benoemd. U kunt bijvoorbeeld ook foto's versturen naar de DayClock. Bezoek onze website voor meer informatie over deze functionaliteiten: www.dayclocks.nl

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de DayClock. Onder de gebruiker wordt de mantelzorgverzorger en/of familie van de hulpbehoevende bedoeld die de DayClock beheert.

Gebruik de inhoudsopgave om door de handleiding te navigeren.

Voor meer informatie of voor het bestellen van een handleiding en/of een DayClock abonnement kunt u terecht bij:

DayClocks International B.V.

Kanaalweg 33-35
2903 LR Capelle a/d IJssel
www.dayclocks.nl
info@dayclocks.nl

Voor vragen of meer informatie over het gebruik van de DayClock, kunt u kijken op onze website: www.dayclocks.nl/veelgestelde-vragen

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Bedoeld en onbedoeld gebruik	4
1.2	Pictogrammen in deze handleiding	4
2	Product omschrijving	5
2.1	Algemeen	5
3	Vorbereidingen voor gebruik	6
3.1	Uitpakken	6
3.2	Aansluiten	6
4	Aan de slag!	7
4.1	De DayClock de eerste keer gebruiken	7
4.2	Een activiteit inplannen (alleen voor abonenthouders)	11
5	Instellingen van de DayClock wijzingen	13
5.1	De weergave van de klok instellen	14
5.2	De kleuren van de klok instellen	15
5.3	De optie Nachtrust in/uitschakelen	16
5.4	Dagdelen aanpassen	17
6	Garantie	18
7	Disclaimer	19

1 Inleiding

1.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik

De DayClock is bedoeld voor hulpbehoevenden om meer inzicht te geven in het tijdsbesef, de geplande activiteiten en helpt ze bewust te zijn van welke dag en hoe laat het is. Het DayClock abonnement is bedoeld om afspraken te maken die weergegeven worden in de DayClock. Zo wordt de hulpbehoevende geholpen met het onthouden en zien van activiteiten die op bepaalde momenten dienen plaats te vinden.

De DayClock wordt standaard geleverd zonder abonnement. Deze dient aanvullend te worden aangeschaft via de webshop van DayClock.

Voor het gebruik van het abonnement is een wifi verbinding noodzakelijk. De DayClock kan alleen via de DayClock App en via de website van DayClock worden bediend.

De DayClock kan aangesloten worden op verschillende accessoires, bijvoorbeeld speakers. Op de website ziet u welke accessoires hiervoor geschikt zijn.

Voorzichtig



Zet de DayClock nooit terug naar fabrieksinstellingen! U bent dan het DayClock softwareprogramma kwijt.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



Waarschuwing

Een waarschuwing betekent dat letsel mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



Voorzichtig

Voorzichtig betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Tip

Een tip verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

2 Product omschrijving

2.1 Algemeen

De DayClock is een Plug & Play tablet en is zowel bedienbaar met als zonder DayClock abonnement. De DayClock wordt standaard geleverd zonder abonnement. Voor optimaal gebruik raden wij u aan het DayClock abonnement aan te schaffen. U kunt zonder abonnement alleen gebruik maken van de klokfuncties. Ook is het zonder DayClock abonnement niet mogelijk om via de DayClock App of via de DayClock website met de DayClock te communiceren.

De DayClock (zonder abonnement) heeft de volgende klokfuncties:

- Weergave tijd
- Weergave dagdeel
- Weergave dag van de week
- Weergave dag van de maand
- Weergave dag van het jaar

De DayClock (met abonnement) heeft de volgende functies:

- Activiteiten maken, beheren en weergeven, zowel met de DayClock App en DayClock website.
- Foto's sturen naar de DayClock en bekijken op de DayClock. U kunt de foto's sturen via de DayClock App en DayClock website.
- Voor de nieuwe features zie www.dayclocks.nl

Voor het gebruik van het abonnement is een wifi verbinding noodzakelijk.

3 Voorbereidingen voor gebruik

3.1 Uitpakken

1. Pak het apparaat voorzichtig uit.
2. Controleer de inhoud van de verpakking. De levering bestaat uit:
 - een DayClock
 - een adapter
 - een micro USB kabel
 - een set steunen
 - een document met uw gebruikersnaam en wachtwoord (alleen voor abonneementhouders)



Tip

Stuur een e-mail naar info@dayclocks.nl als een onderdeel ontbreekt.

3.2 Aansluiten

1. Sluit de tablet aan m.b.v. de meegeleverde adapter en de micro USB kabel.



Tip

Wij adviseren de DayClock altijd aangesloten te laten blijven op de adapter. Indien u DayClock gaat verplaatsen, houd dan rekening met een accuduur van 3 uur.

4 Aan de slag!

4.1 De DayClock de eerste keer gebruiken

U kunt gelijk met de DayClock aan de slag! De datum en tijdweergave zijn al ingesteld.


1. Houd de kleine aan-uit knop ca. 5 seconden ingedrukt. Een Android logo verschijnt. De DayClock wordt nu opgestart. U belandt automatisch in het DayClock hoofdscherm.



Figuur 1: Hoofdscherm

Om in het instellingenscherm te komen (scherm Algemeen), doet u het volgende:

1. Veeg langzaam horizontaal (ca. 5 sec) over het scherm totdat u in de volgende menu komt.

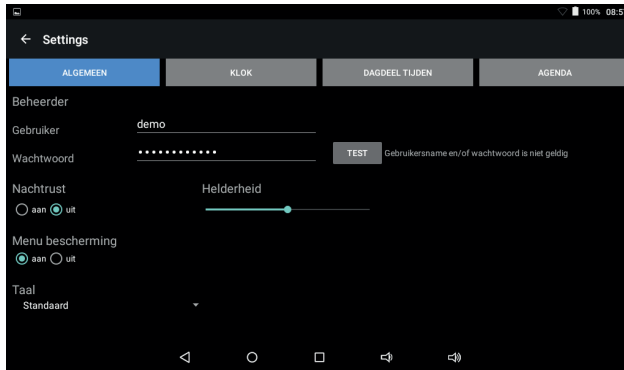

Figuur 2: Scherm- Algemeen


Het scherm Algemeen is opgebouwd uit vier hoofdmenu's:

- Algemeen
 - Klok
 - Dagdeel tijden
 - Agenda (alleen voor abonneementhouders)
2. Indien uw scherm is beveiligd, dient u uw pin in te vullen. De standaard pin is **9876**.





Figuur 3: Scherm- inlogscherm DayClock

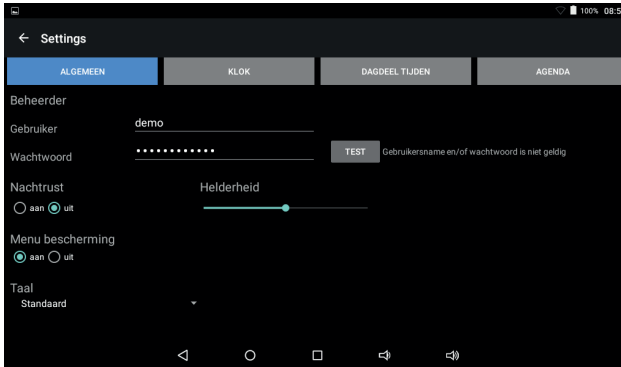4. Druk op **algemeen** en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.



Figuur 4: Scherm- Algemeen

2. Druk op < om uw keuze te bevestigen.
3. Sleep het batterijsymbool  van boven naar beneden.
4. Druk op het wifi icoon  en maak internetverbinding.
5. Druk op de knop **test** om te controleren of de gebruikersnaam en het wachtwoord correct is ingevuld. De melding "geldig" verschijnt indien u de gegevens juist heeft ingevuld.



Tip

Mocht u de melding "niet geldig" verschijnen, dan heeft u de gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist ingevuld of u heeft geen internetverbinding.

Wijzigen activiteit

Activiteit *

Het is de hoogste tijd om op te staan !

Fotoalbum

Begin

Einde

07:30



08:00



Herhaling Zo Ma Di Wo Do Vr Za

Interval (seconden) *

Aantal herhalingen *

Spraak Geluid 1 4

Activiteit kleur



Abbeelding



Voorbeeld

Het is de hoogste tijd om op te staan !

ANNULEREN

BEWAREN

Figuur 5: Nieuwe activiteit

4.2 Een activiteit inplannen (alleen voor abonneementhouders)

U kunt een activiteit via de DayClock App of via de website inplannen. U dient in het bezit te zijn van een DayClock met een DayClock abonnement.

1. Ga naar www.dayclocks.nl of installeer de DayClock App via de Google PlayStore of de Apple App Store.



Tip

Voor Android is een versie 4.4 en hoger vereist.

Voor iOS is een versie 8.0 en hoger vereist.

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
3. Selecteer onder Agenda **Nieuw** . Het scherm **Nieuwe activiteit** verschijnt.
4. Vul bij "Activiteit" uw tekst in. Bij langere teksten schakelt de tekstregel automatisch naar 2 regels. U ziet de activiteit met achtergrond kleur al verschijnen in het voorbeeld onderaan.
5. Vul bij **Begin** de starttijd van de activiteit in en selecteer in de kalender de betreffende begindatum.
6. Vul bij **Einde** de eindtijd van de activiteit in en selecteer in de kalender de betreffende einddatum.
7. Kies een **Activiteit kleur** voor de achtergrond van activiteit.

8. Sleep indien gewenst een afbeelding) naar het kader en laat los. Het plaatje komt naast het kader te staan.



Tip

U kunt via de Ipad geen afbeeldingen uploaden.



Tip

U kunt alleen afbeeldingen in de volgende bestandsformaten uploaden: jpg, jpeg of png.

9. Druk op **BEWAREN** . Het kan max. 1 minuut duren voordat de activiteit zichtbaar is. De activiteiten worden zichtbaar op de ingegeven datum en tijd.



Tip

De activiteiten mogen elkaar niet overlappen.

5 Instellingen van de DayClock wijzingen

Voorzichtig



Zet de DayClock nooit terug naar fabrieksinstellingen! U bent dan het DayClock softwareprogramma kwijt.

U kunt de instellingen van de klok alleen op de DayClock wijzigen. Om de instellingen van de DayClock aan te passen, doet u het volgende:

1. Veeg horizontaal langzaam over het scherm totdat u in de volgende menu komt.
2. Toets de pin in en druk op **OK**. U komt nu in het instellingenscherf van DayClock terecht.



Tip


De standaard pin is "9876".

3. U kunt de volgende instellingen wijzingen/instellen:
 - Weergave van de klok, zie "5.1 De weergave van de klok instellen"
 - De kleuren van de klok, zie "5.2 De kleuren van de klok instellen"
 - De optie nachtrust, zie "5.3 De optie Nachtrust in/uitschakelen"
 - Dagdelen, zie "5.4 Dagdelen aanpassen"
 - Geluidsoptie, zie www.dayclocks.nl
 - Spraakoptie, zie www.dayclocks.nl
 - Alle activiteiten verwijderen (alleen in combinatie met de DayClock abonnement) , zie www.dayclocks.nl
 - De tijd van de DayClock met de tijd van het internet synchroniseren.

5.1 De weergave van de klok instellen

Om de weergave van de klok in te stellen, doet u het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.
2. Druk op Klok. Het instellingenmenu verschijnt.

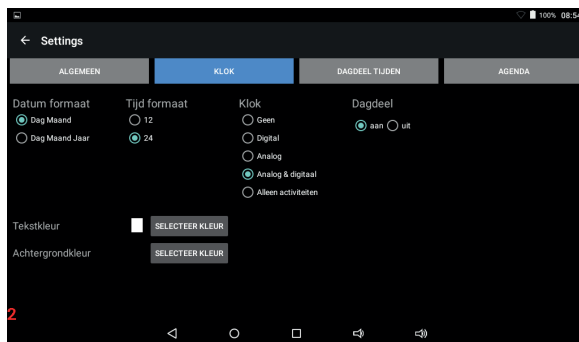

Figuur 6: Scherm- klok

3. U kunt kiezen uit de volgende weergaves: geen, digitaal, analoog, analoog & digitaal en alleen activiteiten.




Tip


De weergave van alleen activiteiten is alleen beschikbaar voor DayClock abonneementhouders.

4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

5.2 De kleuren van de klok instellen

Om de kleuren van de klok in te stellen, doe het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.
2. Druk op **Klok**. Het instellingenmenu verschijnt.
3. Druk op **Selecteer kleur** om de tekstkleur in te stellen. Gebruik de ronde-, en lineaire kleurenschijf om een kleur te kiezen. De standaard tekstkleurcode is zwart (FFFFFFF)
4. Druk op **Selecteur kleur** om de kleur van de achtergrond in te stellen. Gebruik de ronde-, en lineaire kleurenschijf om een kleur te kiezen. De standaard achtergrondkleurcode is wit (0000000)

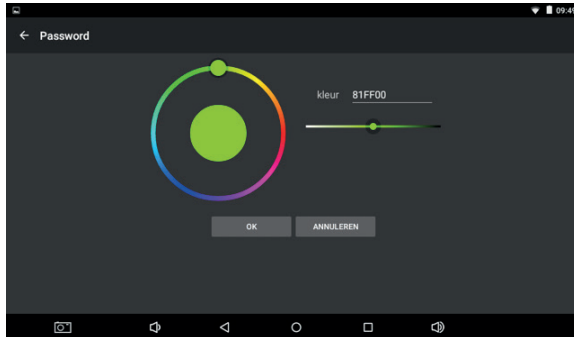

Figuur 7: Scherm= klok kleuren instellen

5. Druk op \triangleleft om uw keuze te bevestigen

5.3 De optie Nachtrust in/uitschakelen

De optie Nachtrust is vergelijkbaar met een Stand-by functie. De DayClock gaat voor een bepaalde tijd op Stand-by. Het scherm schakelt uit en wordt zwart.




Tip


De synchronisatie functie blijft ingeschakeld. De DayClock blijft via de DayClock App en DayClock website informatie ophalen (alleen voor abonneementhouders).

Om de optie **Nachtrust** in of uit te schakelen, doet u het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.
2. Druk op **Algemeen**. Het instellingenmenu verschijnt.

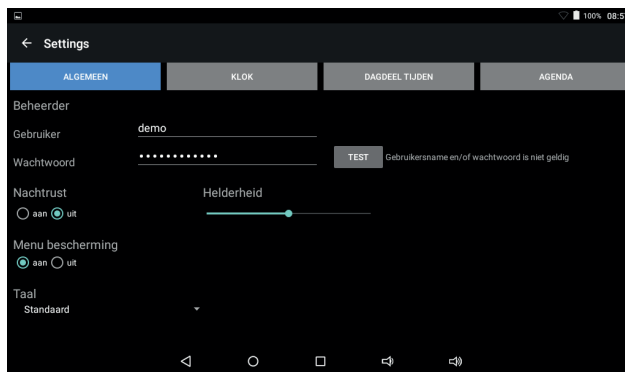

Figuur 8: Scherm- Algemeen

3. Druk op **aan** of **uit** om de nachtrust in te stellen.
4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



Tip


Houd er rekening dat de nachtrustperiode is ingesteld tussen 23:00 en 7:00 uur.

5.4 Dagdelen aanpassen

Hier kunt u de tijden van de dagdelen aanpassen. U kunt geen dagdelen toevoegen of verwijderen.

Om de tijden van de dagdelen aan te passen, doet u het volgende:

1. Druk op het icoon instellingen . Het instellingenmenu verschijnt.

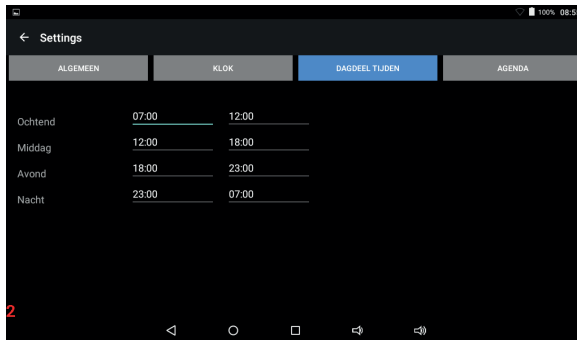

Figuur 9: Scherm- dagdeel tijden

2. Druk op een tijd om deze aan te passen.
3. Druk op \triangleleft om uw keuze te bevestigen.

Tip



- Gebruik dubbele punten tussen de uren en minuten zoals weergegeven.
- Zorg dat de dagdelen op elkaar aansluiten.

6 Garantie

6.1 Dayclocks houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die gelden voor garantie.

6.2 De klant kan alleen garantie claimen bij Dayclocks wanneer het product is aangekocht bij Dayclocks of een erkende wederverkoper van Dayclocks.

6.3 De garantietermijn vangt aan op de datum van aankoop.

6.4 Dayclocks verleent geen garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.

6.5 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is garantie uitgesloten.

6.6 Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Dayclocks is.

6.7 Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

7 Disclaimer

De leverancier is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door het onjuist behandelen of niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen is de garantie nietig.

DayClocks International B.V.

Kanaalweg 33-35

2903 LR Capelle a/d IJssel

www.dayclocks.nl

info@dayclocks.nl



DayClocks