

# Handleiding LOW VISION DESIGN Nederlandssprekende wekker Art.nr. 6425000



- **Tijd uit laten spreken?**

Druk 1x de B4-knop, bovenop in.

- **Tijd instellen?**

Druk 1x de mode B1-knop, rechts in.

De tijdsweergave begint te knipperen. U kunt nu instellingen wijzigen. Wijzig de uurweergave d.m.v. de B3-knop. De uren worden uitgesproken

Wijzig de minutenweergave d.m.v. de B2-knop.

- **Alarmtijd instellen?**

Druk 2x op de mode B1-knop en stel de tijd in m.b.v. B3 - B2.

- **Alarm in-/uitschakelen?**


In de reguliere stand drukt u de B3-knop in, om het alarm in-/uit te schakelen. De wekker geeft via spraak weer: alarm uit, alarm aan, repeteeralarm aan. U kunt ook het alarm uitdrukken met de B4-knop.

- **Automatische urenvermelding?**

In de reguliere stand drukt u de B2-knop in om de automatische urenvermelding aan of uit te zetten. Dit wordt middels spraak ondersteund. U hoort: "urenweergave aan" en bij nogmaals drukken: "urenweergave uit".

Met de B5 knop kunt u het volume regelen.

**B5 B3 B2 B1**

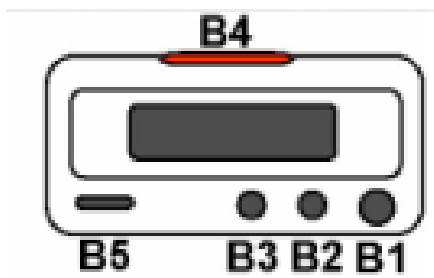

**slechtziend.nl**